

## Wie funktioniert der Alarm?

**Zum Scharfmachen des Alarms Splint entfernen – kräftig ziehen!**

Schalter für Alarmart

**Obere Stellung (Lieferzustand):** Alarm stoppt bei Schließen der Türe!  
(Zum Prüfen: Türe öffnen, Splint entfernen – schließen - öffnen – schließen)

**Untere Stellung:** Alarm wird **nicht** durch Schließen der Türe abgestellt –  
**Abstellen nur möglich durch Einstecken des Splints!**

*Da der Alarm sehr laut ist, empfehlen wir bei Alarm-Check und Öffnen der Türe für Defibrillator-Wartung das Tragen von Gehörschutz!!*

